

Liquido EM 200



Prezzo lordo	53.00 EUR
Prezzo netto	43.44 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	10060

Descrizione del prodotto

LIQUIDO CONCENTRATO EM 200

Il concentrato EM-200 viene utilizzato per la disinfezione e la pulizia di strumenti medici e cosmetici, endoscopi e altri elementi. Viene anche usato per pulire oggetti sensibili alle variazioni di temperatura. Una confezione contiene 500 ml. Il concentrato deve essere diluito in acqua in una quantità compresa tra 1-2% del volume di acqua e pulito per 15-60 minuti (a seconda della concentrazione utilizzata - a una concentrazione più bassa del liquido è necessario un tempo di pulizia più lungo per ottenere l'effetto migliore).

Capienza:**500 ml.**